

Ablaufplan


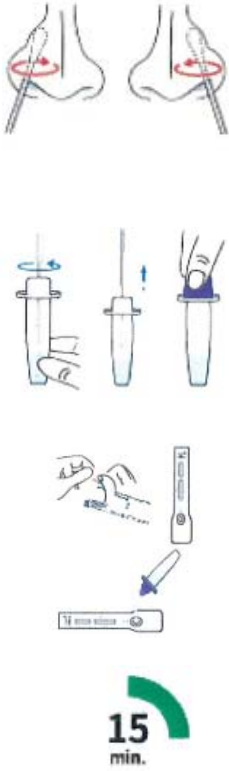
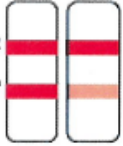

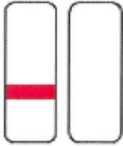

Achtung: Lagerung der Corona-Tests bei Raumtemperatur (4-30C°) und direktes Sonnenlicht vermeiden!

- Die Tests müssen bei Zimmertemperatur auf einer sauberen Arbeitsfläche durchgeführt werden.

Legende:

Unterricht:

- Der Test wird unter Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt.
- Die Lehrkräfte stellen einen digitalen Wecker zur Zeitmessung. (siehe Punkt 3.)
- Nach Beendigung des Tests müssen die Tische mit dem Quick & Easy interior-Spray und Papiertüchern gereinigt werden.

	<p>1. Hände desinfizieren beim Eintreten in das Gebäude</p>
	<p>2. Die Schüler nehmen bei den Tischen mit den ausgelegten Corona-Tests Platz.</p>
	<p>3. Durchführung des Corona-Tests:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entnehmen Sie den Abstrichtupfer ohne Berührung der Wattierung • 1,5 cm mit der Wattierung voran vorsichtig in das Nasenloch einführen • mit mittlerem Druck reiben Sie den Tupfer langsam in einer kreisförmigen Bewegung um die Innenwand Ihrer Nase 4-6 mal für eine Gesamtzeit von 15 Sekunden • im anderen Nasenloch wiederholen • Probenahmeröhrchen öffnen und den Abstrichtupfer mit der entnommenen Probe mind. 15 sec. in die Flüssigkeit tauchen, dabei mehrmalig drehen und 3-mal drücken • beim Herausnehmen, Proberöhrchen gedrückt halten und verschließen • Abstrichtupfer in den beigefügten Plastikbeutel entsorgen • öffnen Sie den Aluminiumbeutel und legen die Testkassette auf eine gerade Oberfläche • das Probenahmeröhrchen an der kleinen Verschraubung öffnen und exakt 4 Tropfen der Probe auf das Probeloch „S“ der Testkassette geben • nach 15 min. kann das Ergebnis abgelesen werden • ein Ergebnis, das nach Ablauf von 30 min. angezeigt wird, ist ungültig
<p>Bewertung des Testergebnisses:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ergebnis 1:Positiv</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ergebnis 2:Negativ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ergebnis 3:Ungültig</p> </div> </div>	
	<p>4. Nach Ablauf der Zeit des Tests alle Bestandteile (inklusive des Verpackungsmaterials) in den kleinen schwarzen 6 Liter Müllbeutel.</p>
	<p>5. Beim Verlassen des Platzes Müllbeutel mitnehmen und in den großen blauen Müllsack entsorgen.</p>
	<p>6. Beim Hinausgehen nochmal Hände desinfizieren.</p>